



MULTI-GYN® VAGINAL DOUCHE & TABLETS

FOR A FEMALE-FRIENDLY, OPTIMAL HYGIENE OF THE VAGINA

Citiți cu atenție informațiile din prospect înainte de utilizare și păstrați-l pentru utilizări ulterioare

Caracteristici

- Ideal pentru o igienă vaginală intensivă
- Efect optim de spălare, eficient și sigur
- Membrana specială nu permite absorția lichidului înapoi în flacon și previne presiunea excesivă
- Design ergonomic, poate fi folosit în orice poziție dorită

Aplicare

- Igienă vaginală generală
- Igienă vaginală intensivă în cazul scurgerilor vaginale excesive, cu miros neplăcut sau culoare anormală, mâncărimi, iritații și senzație de arsură

Frecvența folosirii

Frecvența folosirii irigatorului depinde de starea individuală a vaginului (unele femeile sunt mai sensibile la disconforturi decât altele), stilul de viață, activitatea sexuală (neprotejată) sau menstruația.

În funcție de nevoile personale de igienă, irigatorul Multi-Gyn poate fi folosit mai des, în orice caz nu este recomandată folosirea de mai mult de 3 ori pe săptămână, decât la recomandarea medicului.

Dacă problemele persistă, consultați medicul.

Acest irigator poate fi folosit în diferite poziții: pe toaletă, stând întinsă în cadă sau sub duș. Găsiți-vă singure cea mai comodă poziție. Este important ca fluidul să se elimine singur în timpul spălării. Vă rugăm să consultați indicațiile de utilizare ilustrate mai jos.

Irigatorul vaginal Multi-Gyn și sarcina

Dacă doriți să rămâneți însărcinată, vă recomandăm, să nu folosiți irigatorul cel puțin 3 zile după actul sexual. Irigatorul nu poate fi folosit ca măsură contraceptivă.

Din informațiile cunoscute până în prezent, irigatorul poate fi folosit în siguranță în timpul unei sarcini normale datorită design-ului său unic, care nu mărește presiunea intravaginală. În orice caz, va rugăm, să consultați medicul dacă sunteți însărcinată.



MULTI-GYN® VAGINAL DOUCHE & TABLETS


FOR A FEMALE-FRIENDLY, OPTIMAL HYGIENE OF THE VAGINA

Atenție:


Irigatorul nu trebuie fiert sau introdus în apă fierbinte, pentru că se va deforma iremediabil.



1. Adăugați apă călduță până la nivelul nervurilor.
2. Rupeți tableta Multi-Gyn și puneți-o în flacon.
3. Înșurubați aplicatorul pe flacon și așteptați dizolvarea tabletei.

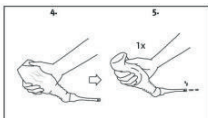

4. Introduceți cu blândețe aplicatorul în vagin într-o poziție cât mai confortabilă.
5. Strângeți cu blândețe flaconul o singură dată pentru a curăța astfel vaginul. Nu este necesar să goliți flaconul.

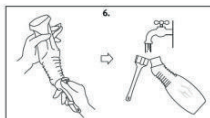

6. Clătiți flaconul și aplicatorul cu apă caldă.

Multi-Gyn Tablete – au creat un fluid natural și ușor pentru igiena optimă a vaginului

Caracteristicile produsului:

1. Gata dozat, 1 tabletă pentru 1 spălare cu irigatorul Multi-Gyn;
2. Ingrediente naturale, fără conservanți sau parfum;
3. Folosite cu irigatorul Multi-Gyn tabletele efervescente oferă o igienă intimă optimă.

Igienă sigură cu ingrediente naturale

Tabletele Multi-Gyn, dizolvate în apă călduță, au creat un lichid ușor potrivit pentru utilizarea împreună cu irigatorul Multi-Gyn. Tabletele concentrate efervescente conțin ingrediente naturale, fără conservanți. Ingredientele folosite pentru tabletele Multi-Gyn nu afectează în mod negativ flora vaginală,

Ingrediente active

- *complex 2QR, acid lactic, acid ascorbic, lactoză.
- *complex 2QR, polizaharide bio-activ patentate

Păstrare:

A se păstra tabletele în tubul original, într-un loc uscat, la temperaturi între 10°C și 25°C

Creat și produs de: **BioClin BV, Delft, Olanda**